



EPILMOON EX

الضوء النابض

الضوء النابض * نظام فعّال جداً * جلسات علاج سريعة* تأثير واسع المجال جداً 23×57 ملم * قارئ ومصنف البشرة وفقاً لنسبة الميلانين وذلك من أجل الاستخدام الآمن * سهولة الاستخدام * تعددية استخدام قصوى، تغيير الرؤوس خلال 10 ثواني *إدارة الجهاز عن طريق معالج دقيق

إعادة الشباب للبشرة


معالجة التجاعيد والأوعية الدموية الشعرية السطحية، وتوسع الأوعية الدموية الشعرية، وبقع البشرة إن إعادة الشباب للبشرة بالعلاج الضوئي والذي يتم عن طريق الضوء النابض يمثل علاج غير مؤذي، ولا يسبب رضوض، كما أنه علاج مبتكر يقوم تدريجياً بتقليل علامات تقدم سن البشرة. الطيف الضوئي المنبعث من جهاز EpilMoon EX والذي يتراوح بين 550 و 1100 نانومتر، يسمح بمعالجة عيوب البشرة المختلفة في نفس الوقت: توسع الأوعية الدموية الشعرية، التجاعيد السطحية، الأوعية الدموية الشعرية السطحية، والبقع الناتجة عن تقدم العمر. إن الانبعاث الضوئي ذو الكثافة العالية يؤدي إلى زيادة درجة الحرارة في الطبقات العميقة من الجلد مما يسبب رضوض صغيرة، وبالتالي يتم تحفيز عملية التعافي التلقائي التي تؤدي إلى قيام الخلايا الليفية بتكوين الكولاجين و الإيلاستين. وتسبب هذه العملية ملء التجاعيد الصغيرة، وتزيد من شد السطح الخارجي للبشرة. فتصبح البشرة أكثر صفاءً، ونعومة، ومرونة، وتصبح التجاعيد أقل بروزاً، وبشكل عام فإن البشرة يكون مظهرها أفضل.

إزالة الشعر الزائد


يسمح بتقليل الشعر الزائد عن طريق سلسلة من الجلسات العلاجية حتى الحصول على النتائج المطلوبة (يمكن أن يتبقى فقط القليل من الشعر الخفيف الغير مؤثر من الناحية الجمالية). إن الضوء المنبعث من مقبض الجهاز (طوله الموجي من 500 إلى 1100 نانومتر) يتلف بصيالات الشعر وذلك بتسخينها إلى درجة حرارة قادرة على تدميرها (التخثر عند من 70 إلى 80° سيليزيوس تقريباً). يقوم الميلانين الموجود في الشعيرة بامتصاص الطاقة المنبعثة. يتم التعامل مع الشعيرات في مرحلة نموها (طور التنامي)، ولهذا السبب يجب أن يتم تكرار الجلسات كل شهر تقريباً، بحيث يمكن القضاء على كافة الشعيرات الغير مرغوب بها في طور التنامي، حتى تختفي تماماً وهذا ما يحدث عادةً بعد 8/4 جلسات علاجية (لكل منطقة)، وهذا يعتمد على الشخص ونوع الشعر الذي يتم التعامل معه. من الجدير بالعلم أنه كلما كانت الشعيرات داكنة وأكثر سمكاً ستكون النتائج واضحة.

الصدفية


يُنصح بهذا العلاج في حالات الصدفية القشرية أو الصدفية النقطية، وذلك للمرضى الذين يعانون من التهابات خفيفة أو متوسطة. إن طول الموجة التي تستخدمها رأس الانبعاث تتراوح بين 300 إلى 1100 نانومتر. عادةً ما يتوجب تكرار جلسات العلاج لأكثر من مرة وذلك بناءً على قرار الطبيب المعالج.

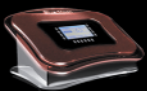


CELLULAB
Cavitation

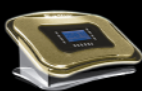


TRICOPPLUS
Hair regrowth

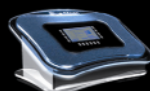

AIRMOON
Pressomassage

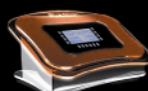

MESODERMA
Electroporation

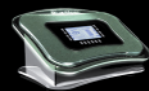

INTRADERMA
Radiofrequency



EPILMOON EX
Intense pulsed light



حب الشباب
بتبديل رأس الانبعاث يسمح الجهاز بمعالجة حب الشباب الشائع الذي تسببه بكتيريا حب الشباب. إن طول
الموجة المثالي هو من 400 إلى 1100 نانومتر. فالبكتيريا تموت عند تعرضها للضوء العالي الكثافة الذي
ينبعث من الجهاز.

البيانات التقنية:

مصدر الضوء: 2 مصباح زينون
الطاقة المنبعثة: من 5 إلى 11.5 جول/سم² (150 جول إجمالي)
زمن النبضة: من 8 إلى 35 ملي ثانية
زمن إعادة شحن النبضات: من 3 إلى 7 ثواني
مساحة البقعة الضوئية: 23×57 ملم (13.1 سم²)
الحجم: 23×55×36 سم
الوزن: 8.2 كجم
نظام التبريد: شفت هواء
التصنيف: الفئة I نوع B

يعد نظام جديد وثوري يعمل بالضوء النابض لعلاج الشعر الزائد، ولإعادة الشباب للبشرة، ولعلاج حب الشباب، والصدفية
البرنامج مزود بمجس خاص لتصنيف البشرة على حسب نسبة الميلانين، ومزود بخاصية الجرعة المنفردة والمزدوجة
والثلاثية.

- مع مجس لتصنيف البشرة على حسب نسبة الميلانين
- مجس خاص لتصنيف البشرة على حسب نسبة الميلانين
- بعد ثلاث جلسات علاجية


مقدمة عن الشركة

تأسست شركة Blue-Moon S.r.l. في عام 2004 وذلك كعلامة تجارية لشركة Sistemi Elettronici Digitali S.r.l. المتخصصة في تصميم، وإنتاج، وبيع الأجهزة المخصصة للتجميل والمعالجة الطبية. وتعد الشركة جزء من مجموعة Caccia Elettronica Industriale التي تعمل في مجال والإلكترونيات والميكنة منذ عام 1974. ومنذ أكثر من 30 عاماً تقوم بتصميم وإنتاج الأجهزة الطبية والتجميلية العالية الكفاءة من أجل شركات أخرى، ومنذ 4 سنوات تقوم بتسويق هذه الأجهزة مباشرة، وذلك طبقاً لمعايير UNI EN ISO 9001، و13485. إن فريق الشركة الذي يتألف من مهندسين وتقنيين متخصصين على اتصال دائم مع أطباء وخبراء في هذا المجال، يعطي اهتماماً كبيراً للسلامة ولتطوير منتجات مبتكرة دائماً. كما نقوم بإنجاز مشروعات طموحة، وقادرة على تقديم خدمات ممتازة وذلك أيضاً من ناحية فاعلية الأداء والتصميم.


إن كافة منتجاتنا تتوافق مع المقاييس السارية المفعول، ولقد قام أطباء متخصصين باختبارها قبل طرحها في السوق. إن صالة عرضنا تقع بالقرب من مصنعنا الواقع في Legnano، على مشارف ميلانو، حيث يمكن مشاهدة الأجهزة و حضور ورشات العمل المنظمة لتدريب عملائنا.




CELLULAB
Cavitation

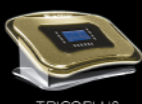


TRICOPLUS
Hair regrowth

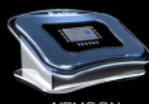

AIRMOON
Pressomassage

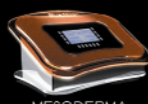

MESODERMA
Electroporation

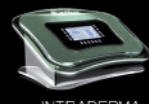

INTRADERMA
Radiofrequency



EPILMOON EX
Intense pulsed light